

паспорт

Аккумулятор литий-ионный DJ-2412 24V 12Ah

Технические характеристики

Напряжение	24 V
Емкость	12 Ah
Номинальная мощность	288 Wh
Ограничение напряжения заряда	29.4 V
Ограничение напряжения разряда	21 V
Ограничение тока заряда	9 A
Нормальный заряд	6 A
Нормальный разряд	12 A
Максимальный ток заряда	9 A
Максимальный непрерывный разряд	15 A
Максимальный ток разряда	36 A
Диапазон рабочих температур	Заряд: 0~45°C Разряд: -20~55°C
Температура хранения	0~30°C ≥ 6 месяцев
Влажность при эксплуатации и хранении	40%~60% Rh
Функция защитной панели	Защита от перезаряда, защита от переразряда, защита от перегрузки по току, защита от короткого замыкания, защита от перегрева
Вес	2.2 кг

Гарантийное обслуживание

Модель	Аккумулятор литий-ионный DJ-2412 24V 12Ah
Гарантийный срок	6 месяцев
Производитель	Hangzhou Dongjian Energy Tech Co., Ltd. Qunli Village, Guali Town, Hangzhou, Zhejiang China
Страна происхождения	Китай
Регистрационный номер декларации о соответствии	POCC RU Д-CN.PA01.B.11666/26
По заказу	ООО «Реамед»
Адрес	394026, Российская Федерация, Воронежская обл., город Воронеж, Московский проспект, дом 11
Веб-сайт	ortonica.ru
E-mail	service@ortonica.ru

По вопросам гарантийного обслуживания Вы можете обратиться по телефону 8-800-707-44-52

Данный паспорт предназначен для описания продукта, его характеристик и производительности, применяемым к перезаряжаемой литий-ионной батарее.



Применение АКБ: коляска инвалидная с электроприводом Ortonica Pulse 620, 720.

Размеры, мм

Длина (макс.)	228 мм ± 1
Ширина	125 мм ± 1
Высота	115 мм ± 1

Меры предосторожности

Пожалуйста, строго соблюдайте приведенные ниже инструкции по потреблению электроэнергии. Компания не несет никакой ответственности за несчастные случаи, вызванные несоблюдением инструкций.

- Не бросайте аккумулятор в огонь, не нагревайте, не роняйте и не ударяйте по нему.
- Не бросайте аккумулятор в жидкость, например, воду, бензин или любые напитки.
- Не используйте рядом с огнем или при температуре окружающей среды выше 60 °C.
- Не разбирайте аккумулятор, разборка может вызвать внутреннее короткое замыкание аккумулятора, которое может повлечь выделение газа, возгорание, взрыв или другие последствия.
- Не используйте аккумулятор, если он поврежден.
- Держите аккумулятор в месте недоступном для детей.

Обратите внимание

- Перед использованием аккумулятора внимательно прочтите инструкцию.
- Если аккумулятор не используется долгое время, храните его в чистом, сухом и вентилируемом помещении при температуре от -0 до 30°C и влажностью менее 60%.
- Аккумулятор следует заряжать, использовать и хранить вдали от источников статического электричества.
- В случае окисления клемм питания перед использованием удалите оксидный слой.
- Если для зарядки аккумулятора требуется больше времени, чем у Вас есть, пожалуйста, прекратите зарядку.
- Если при использовании нестабильного выходного напряжения питания, чувствуется запах или что-то происходит не так, пожалуйста, прекратите использовать аккумулятор.
- Внешнее короткое замыкание может вызвать повышение температуры и повредить аккумулятор.